

The image shows a medical device, the Pruitt F3 Carotid Shunt Kit, against a white background. The device consists of a long, clear plastic tube with two blue balloons at the ends. One balloon is connected to a red plastic fitting with a cross-handle, and the other is connected to a clear plastic fitting with a cross-handle. The tube has a Y-junction in the middle. The text "Pruitt F3" is printed on the tube near the left balloon. The background is split into a white top half and a yellow bottom half, with a teal horizontal band across the middle.

Pruitt F3[®] Shunt de Carótida

NOVO Kit de Carótida Pruitt
Já Disponível

Pruitt F3[®]

Shunt de Carótida

A nova geração de shunts com balão

O Shunt de Carótida Pruitt F3 é fabricado com um material mais flexível, que também oferece maior resistência à dobra (kinking). Além disso, possui codificação por cores para facilitar a identificação e proporciona 10% mais fluxo em comparação com o Shunt de Carótida Pruitt-Inahara® original.

Oclusão Atraumática com Balão Duplo: Sem Necessidade de Pinçamento

O design com balão duplo permite inserção rápida e fácil, proporcionando oclusão atraumática sem necessidade de pinçamento das artérias carótida interna e carótida comum.

Dados em arquivo na LeMaitre Vascular, Inc.



Your Peripheral Vision™

O Shunt Pruitt F3 é fabricado com um material mais flexível, que também oferece maior resistência à dobra (kinking).


Porta em T para infusão e irrigação (flush), permitindo o monitoramento do fluxo sanguíneo, da pressão arterial, da permeabilidade do shunt e a remoção segura de partículas embólicas. O menor diâmetro interno reduz a probabilidade de entrada de partículas no shunt.

Bainha de segurança na cor amarela para maior visibilidade. Se o balão da artéria carótida comum for inflado excessivamente, a pressão excedente é desviada para o balão de segurança, evitando danos à artéria.


Marcas de Profundidade indicam a profundidade de inserção do shunt na artéria carótida.

Lúmen de insuflação comum com codificação por cores e marcações de profundidade destacam o trajeto de insuflação, desde a torneira azul até o balão azul.


Balão de Segurança: Previne a Hiperinsuflação

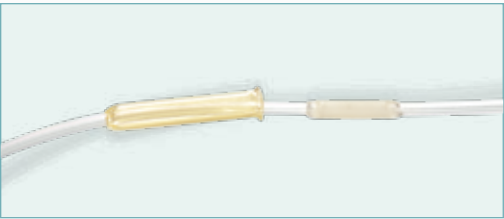

ETAPA 1 - O balão de segurança especial, com bainha plástica móvel, minimiza o risco de hiperinsuflação do Balão da Carótida Interna (ICB). Deslize a bainha plástica para fora do balão de segurança e insufe o ICB.

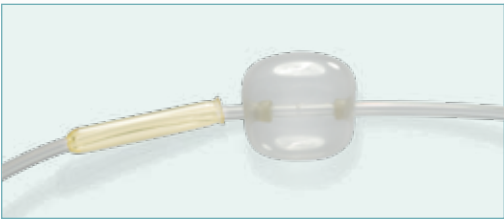

ETAPA 2 - Se o Balão da Carótida Interna (ICB) sofrer hiperinsuflação, a pressão excedente é desviada para o balão de segurança, evitando danos à artéria.

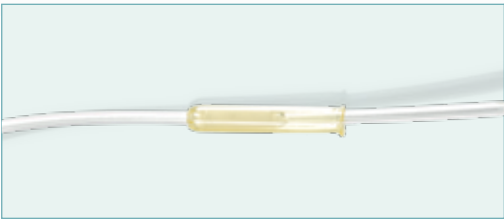

ETAPA 3 - Após a insuflação do Balão da Carótida Interna (ICB), deslize a bainha plástica sobre o balão de segurança para evitar a desinsuflação do ICB.

Pruitt F3®

Shunt de Carótida



INFORMAÇÕES DE COMPRA

Diâmetro Comprimento Modelo

Shunt de Carótida Externo Pruitt F3

Shunt com T-Port	8F	31 cm	2013-10
Shunt com T-Port	9F	31 cm	2012-10
Shunt sem T-Port	9F	31 cm	2012-11
Shunt com T-Port	10F	31 cm	2011-10

Shunt de Carótida Interno Pruitt F3

Shunt com T-Port	9F	15 cm	2012-12
Shunt sem T-Port	9F	15 cm	2012-13
Shunt com T-Port	10F	15 cm	2011-12



NOVO

Kit de Carótida Pruitt

2032-10

Inclui:

- 1 un. Shunt Externo Pruitt F3 9F com Porta em T
- 1 un. Patch Vascular Biológico XenoSure® (Pericárdio Bovino), tamanho 0,8 cm x 8 cm

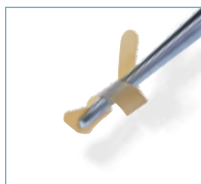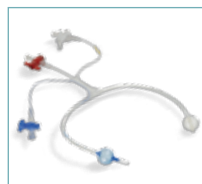

* Venda apenas nos Estados Unidos

O Patch Vascular Biológico XenoSure é fabricado pela Neovasc Inc., 13700 Mayfield Place, Suite 2135, Richmond BC V6V 2E4, Canadá, e é distribuído pela LeMaitre Vascular nos Estados Unidos e em diversos mercados europeus.

Estas especificações não constituem garantia. No interesse da melhoria contínua do produto, estas especificações podem ser alteradas periodicamente, sem aviso prévio. Consulte seu representante de vendas para obter mais detalhes.

LeMaitre Vascular, Inc.

63 Second Avenue
Burlington, MA 01803
USA

T 781 221 2266

F 781 221 2223

LeMaitre Vascular GmbH

Otto-Volger-Str. 5a/b
65843 Sulzbach/Ts.
Germany

T +49 (0)6196 659230

F +49 (0)6196 527072

LeMaitre Vascular GK

1F Kubodera Twin Tower Bldg.
2-9-4 Kudan-minami, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0074
Japan

T +81 (0)3 5215 5681

F +81 (0)3 5215 5682

For More Information:

Contact your local LeMaitre
Vascular Sales Representative.

For Customer Service:

Call 800 628 9470

www.lemaitre.com

LeMaitre®
VASCULAR
Your Peripheral Vision™

tecmedic
PRODUTOS MÉDICOS

Rua Brasilio Cuman, 566 – São Braz – CEP 82315-010 – Curitiba – PR
Fone/Fax: +55 (41) 3233-7887 / www.tecmedic.com.br

LeMaitre, Pruitt F3, Pruitt-Inahara, and XenoSure are registered trademarks and Your Peripheral Vision is a trademark of LeMaitre Vascular, Inc.
©2011 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved. Printed in the USA. M0001 Rev. I 04/11

CE
0088